



Täytä tarkkaan lähetteen **kaikki** kohdat ja lue lähetysohje huolella.

Toimija ja yhteyshenkilö sekä tarhan näytekoodi	Yhteyshenkilön puhelin
Osoite	
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite	Pitopaikkatunnus* FI0000

\*Pitopaikkatunnus on pakollinen tieto

### NÄYTETIEDOT

Kokonainen eläin	Verinäyte <input type="checkbox"/>	Sivelynäyte <input type="checkbox"/>
Lopetusseuranta tartuntatilalta <input type="checkbox"/>	Lopetusseuranta tartuntatilalta <input type="checkbox"/>	
Muu seuranta tartuntatilalta <input type="checkbox"/>	Muu seuranta tartuntatilalta <input type="checkbox"/>	
Kartoitus, ei tartuntatila <input type="checkbox"/>	Kartoitus, ei tartuntatila <input type="checkbox"/>	
Tautiepäily <input type="checkbox"/>	Tautiepäily <input type="checkbox"/>	
Eläinlajit näytteille		
Minkki kpl	Aikuisia kpl	Pentuja kpl
Sinikettu kpl	Aikuisia kpl	Pentuja kpl
Hopeakettu kpl	Aikuisia kpl	Pentuja kpl
Risteytyskettu kpl	Aikuisia kpl	Pentuja kpl
Supikoira kpl	Aikuisia kpl	Pentuja kpl

Lähettävä eläinlääkäri	
Sähköpostiosoite	
Tulosten toimitusosoite <input type="checkbox"/> <a href="mailto:ymparistoterveydenhuolto.lansi@avi.fi">ymparistoterveydenhuolto.lansi@avi.fi</a>	Muu:

Paikka ja aika	Tilaaajan allekirjoitus ja nimenselvennys
----------------	---



## **Näytteiden pakkausohje**

### **Ohje turkiseläinten pakkaamiseen ja toimittamiseen Ruokaviraston laboratorioon**

- Kääri eläin imukykyiseen materiaaliin
- Sulje kääritty näyte Näytepussiin (n. 30 L muovipussi) ja sulje pussi nippusiteellä
- Suihkuta Näytepussin ulkopuoli desinfiointiaineella (70 % etanoli tai Virkon S-liuos)
- Täytä Suojapussi imukykyisellä materiaalilla
- Siirrä Näytepussi Suojapussin sisälle ja sulje Suojapussi nippusiteellä
- Siirrä Suojapussi pahvilaatikkoon
- Pakkaa enintään 20 kg näytteitä sisältäviä suojapusseja pahvilaatikkoon
- Merkitse kaikki pahvilaatikot Näytekoodilla ja juoksevalla numerolla
- Sulje Tutkimuslähete muovipussiin ja teippaa sen yhden pahvilaatikon päälle
- Jäätäneet eläimet pakataan erilliseen pakettiin kuin lämpimät
- Merkitse jäisten eläinten pahvilaatikkoon ”Jäätynyt”
- Merkitse pahvilaatikon pintaan etukäteen sovittu toimitusosoite, joka on joko ”Ruokavirasto Seinäjoki” tai ”Ruokavirasto Oulu”

### **Verinäyteputkien ja sivelynäytteiden toimittaminen Ruokaviraston Eläintautivirologialle**

- Pakkaa näyteputket erilleen toisistaan, joko
  - solumuoviseen putkimoduuliin tai
  - aaltopahviin, jossa on putkille omat lokerot
- Lisää Näytepussiin imukykyistä materiaalia
- Sulje näyteputkipakkaus Näytepussiin
- Lisää Suojapussiin imukykyistä materiaalia
- Sulje Näytepussi Suojapussiin
- Pakkaa Suojapussi Ruokaviraston kelta-mustaraitaiseen Näytelaatikkoon
- Täytä Näytelaatikko täyteaineella ja sulje se
- Teippaa lähete Näytelaatikkoon
- Näytelaatikkoa ei tule pakata raatonäytelaatikkoon

Kaikkien pakettien päälle teipataan UN3373-merkintä (biologinen näyte, kategoria B)